

Investigations / Cause :

Les résultats de l'étude ont démontré que l'interférence est probablement causée par la forte absorption de l'ICG à la longueur d'onde de mesure des tests de Bilirubine.

En conséquence le résultat obtenu est incohérent et accompagné de l'alarme « > Test ».

Actions prises par Roche Diagnostics :

L'interférence au Vert d'indocyanine sur les tests de Bilirubine est mentionnée dans les fiches techniques.

Une note d'attention est ajoutée dans la section « Limites d'utilisation –Interférences » :

Les échantillons contenant du vert d'indocyanine ne doivent pas être analysés

En conséquence, les cliniciens doivent être informés de cette interférence potentielle sur les résultats des tests listés.

Les Fiches Techniques de tous les tests de Bilirubine Roche ont été modifiées en conséquence. Elles sont disponibles sur notre site e-LabDoc.

Notre assistance technique et scientifique reste à votre disposition au 04 76 76 30 65 pour répondre à vos questions.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Chère Cliente, Cher Client, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Philippe DELIE
Chef de Groupe Automation IT & WF
Marketing Diagnostics
RB/SC/10-16



Rachel BOURNOT
Chef de Produits Ligne Sérum
Marketing Diagnostics



Roche Diagnostics France

2, avenue du Vercors
B.P. 59
38242 Meylan Cedex
Tél. +33 (0)4 76 76 30 00
Fax +33 (0)4 76 76 30 01

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 965 175 euros
380 484 766 RCS Grenoble
Code APE 4646Z
N° T.V.A. : FR 20 380 484 766
SIRET : 380 484 766 00031

cobas[®]
Life needs answers